

BLACK MOGU



INFORMATIONEN

ANSPRECHPARTNER:

Technische Beratung · Unterstützung 3Shape Konstruktionen

ZT Murat Sabani

murat.sabani@flussfisch-dental.de

☎ 040 860766

Tim-Frederic Flussfisch, Team-Leitung NEM-Fertigungszentrum

Unterstützung Datenanlieferung und Fertigungsprozess

frederic.flussfisch@flussfisch-dental.de

☎ 040 86608223

DATENANLIEFERUNG UND PRODUKTION:

Kundenportal: www.flussfisch-lasersintern.de

Bei Datenanlieferung bis **15:00 Uhr** erfolgt die Zustellung nach max. 72 Stunden.

VORAUSSETZUNGEN FÜR 3SHAPE ANWENDER:

Scanner: 3Shape D700 oder höher

Software: DentalSystem 2014-2.9.9.5

BITTE BEACHTEN:

- Höchste Scan-Genauigkeit einstellen (lange Scanzeit)
- Verwendung der Standardparameter: 3Shape - AddOn Modul: Removable Partial Design
Sollte das AddOn Modul noch nicht auf Ihrem Dongle freigeschaltet sein, erhalten Sie über Ihren Lizenzgeber 15 Freispeicherungen.
- Konstruktionsdesign: wie der Modellguss offiziell aussehen soll - keine Besonderheiten
- **KEINE KLAMMERN SCHLIESSEN**
- **KEINE BARS (STREBEN) ANSETZEN**
- Ausschließlich Klammermodellguss

KONSTRUKTIONSHILFE OK:

- Basisplatte 0,75 - 0,9mm
- Skelettierte 1,0mm - 1,2mm
- Transversalband 1,0 - 1,2mm
- Aufsteigender Ast 1,5 - 2,0mm
- Klammern 1,2mm
- Klammerschulter 1,5mm - 2,0mm
- Gegenlager 1,0mm



KONSTRUKTIONSHILFE UK:

- Sublingualbügel 1,8mm - 2,0mm x 4,0mm in Tropfenform
- Sattel 1,00 - 1,20mm
- Aufsteigender Ast 1,5 - 2,0mm
- Klammern 1,2mm
- Klammerschulter 1,2mm
- Klammerspitze 0,9mm
- Gegenlager 1,0mm

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.