

priti®MPguide ZrO₂

High Translucent und Extra Translucent

Übersichtlich, hochwertig, anwenderfreundlich

priti®MPguide High Translucent ist der Schlüssel für die Auswahl der pritidenta-Farbkategorie und die Zuordnung zu den **VITA® Farben**.


Mit dem priti®MPguide High Translucent nehmen Sie die Farbauswahl in bekannter Weise vor: Einfach die Farbmusterstäbchen am Zahn abgleichen.

Auf jedem Stäbchen sind die Farbkategorie und die erforderliche Position in der Disc (oben/mittig/unten) angegeben. Die Musterzähne werden aus original priti® ZrO₂ multicolor High Translucent und Extra Translucent hergestellt.

Damit werden exakt die Zahnfarben von Zirkoniumdioxid von pritidenta konkretisiert.

Farbzuordnungstabelle

pritidenta® Farbbezeichnung	Position	VITA classical®	VITA System 3D-Master®
A light	oben	A1	2M1, 1M2, 2R1.5
	mittig	A2	2M2
	unten	A3	3M2
A dark	oben	A3.5	3R2.5
	mittig		
	unten	A4	5M3, 4L2.5
B light	oben	B1	
	mittig		
	unten	B2	2L1.5
B dark	oben	B3	3L2.5
	mittig		
	unten	B4	3M3
C light	oben	C1	3M1
	mittig		
	unten	C2	3L1.5
C dark	oben	C3	
	mittig		4L1.5
	unten	C4	5M1, 5M2
D light	oben	D2	
	mittig	D3	4R1.5, 4R2.5
	unten	D4	3R1.5, 4M1, 4M2, 4M3
priti® bleach	oben		0M1, 0M2
	mittig		0M3
	unten		1M1

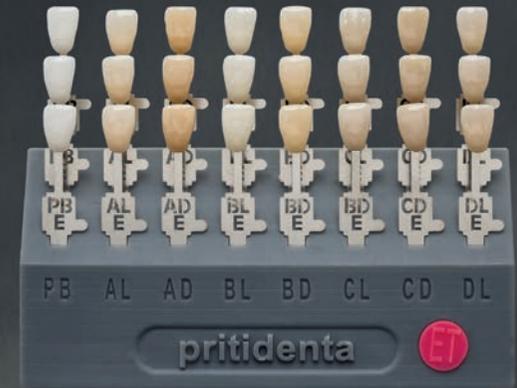

Artikelnummer Extra Translucent
MPGEZR01



Artikelnummer High Translucent
13103-E1100HT